



# CATH WEAR

## INSTRUCTIONS

The following instructions provide a general overview on how to use CathWear. For instructions on using CathWear for a specific catheter setup, please visit our website at [www.CathWear.com](http://www.CathWear.com) and watch our "How to use Cathwear" instructional videos listed under the "Our Product" tab. The instructional videos include:


BILIARY catheter instructions

FOLEY catheter instructions

SUPRAPUBIC catheter instructions


NEPHROSTOMY catheter instructions

1.

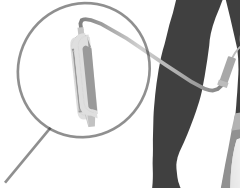


ROLL UP  
LEG BAG

2.

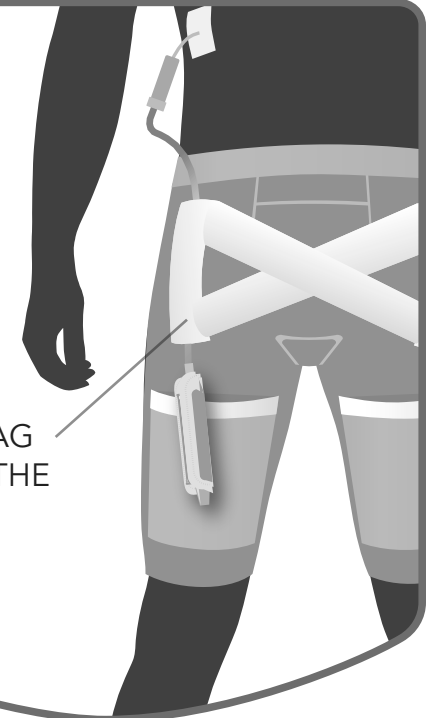


RUN LEG BAG  
THROUGH THE  
CATHETER  
CHANNEL  
TRACT

3.

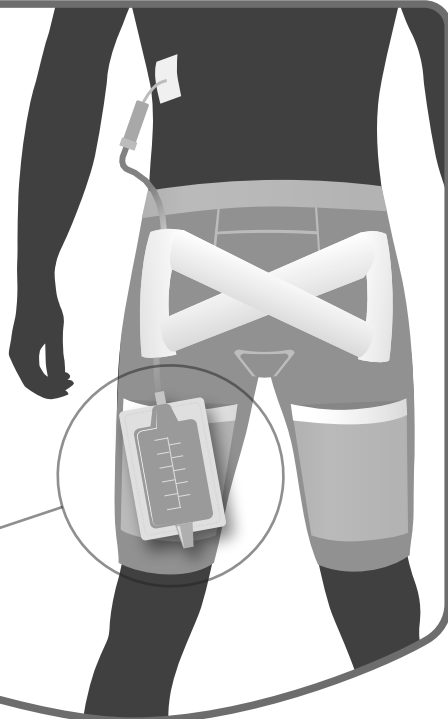


UNROLL  
LEG BAG

4.

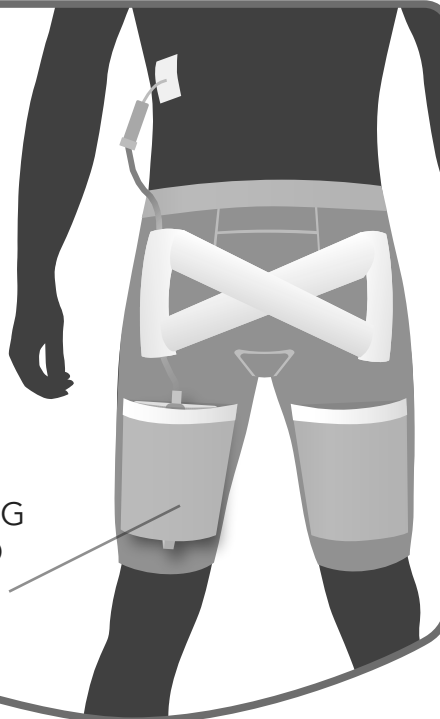

INSERT LEG  
BAG INTO  
POCKET

5.

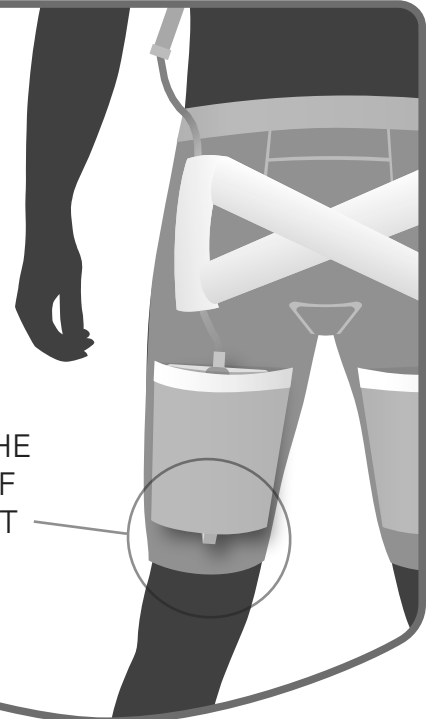

EXIT THE  
VALVE AT THE  
BOTTOM OF  
THE POCKET



## INSTRUCCIONES

Las siguientes instrucciones muestran una descripción básica sobre cómo usar CathWear.

Para instrucciones sobre el uso de CathWear para configuraciones de catéter específicas, visítanos en nuestra página de web [www.CathWear.com](http://www.CathWear.com) para ver los videos instructivos de *How To Use CathWear (Como Usar CathWear)* que están localizado en la sección de *Our Product (Nuestro Producto)*.

Las instrucciones específicas del catéter que están en [www.CathWear.com](http://www.CathWear.com) son:

Instrucciones para BILIAR catéter

Instrucciones para FOLEY catéter

Instrucciones para SUPRAPUBICO catéter

Instrucciones para NEFROSTOMIA catéter

1.



ENROLLA LA BOLSA DE ORINA/DRENAJE DE PIERNA

2.

PASE LA BOLSA DE ORINA/DRENAJE DE PIERNA A TRAVÉS DEL TRACTO QUE MEJOR LE CORRESPONDE

3.

DESENROLLA LA BOLSA DE ORINA/DRENAJE DE PIERNA

4.

COLOCA LA BOLSA DE ORINA/DRENAJE DE PIERNA EN EL BOLSILLO

5.

COLOCA LA VÁLVULA POR LA APERTURA HALLADO EN EL FONDO DEL BOLSILLO