





# Kendall SCD™ 700 Sequential Compression System

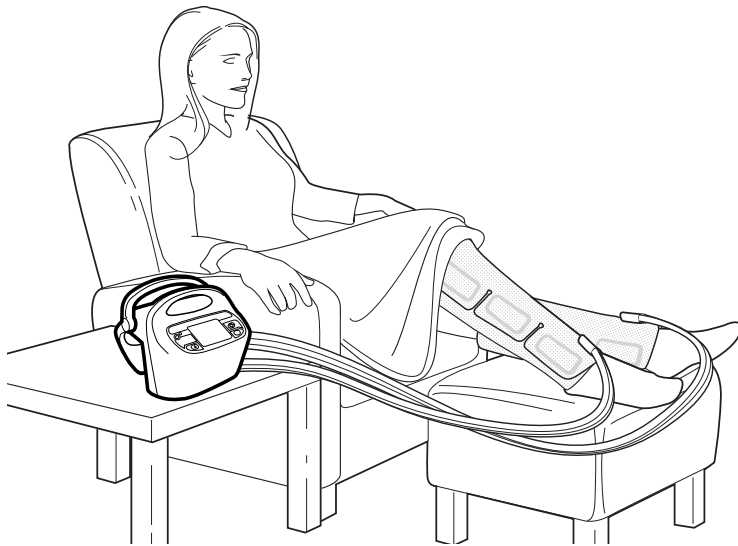

## Controller & Tubing Set

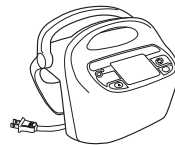


Controller



Tubing


## Garments (packaged separately)

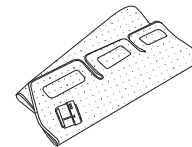

Leg Sleeve(s)




Foot Cuff(s)

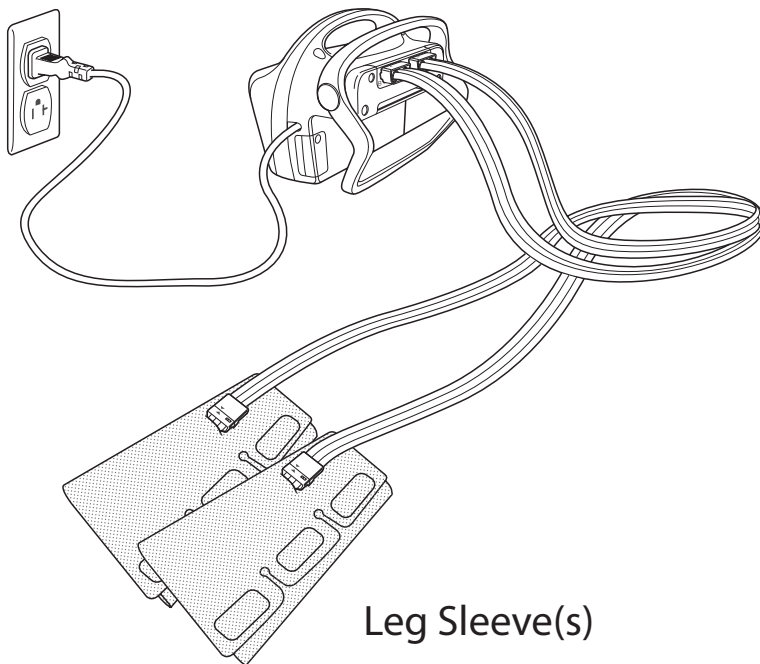

Leg Sleeve(s)

## Foot Cuff(s)

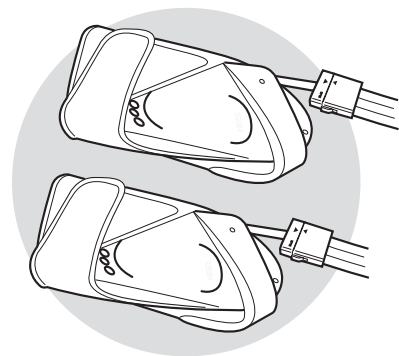

# Quick Start Guide

## Set up Controller

### 1 Put Controller on:


Flat surface near chair



Flat surface near bed



Put controller on footboard

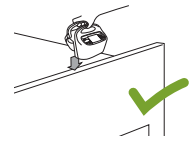

Do NOT cover Controller


### 2 Plug Controller in



Do NOT turn Controller on yet




### 3 Attach tubing to Controller

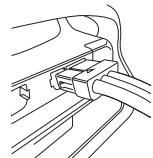

## Set up Leg Sleeve(s)




### 4 Wrap leg sleeve(s) around leg(s)

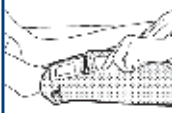


NOTE: The tubing connector should be at the ankle.

### 5 Check for snug fit

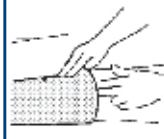

A snug fit will allow just enough room for two fingers to fit between sleeve and leg.

### 6 Attach tubing to leg sleeve(s)

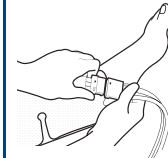


### 7 Turn Controller on



Wait for internal checks to finish

### 8 Therapy will now begin

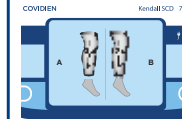

When using leg sleeves, no further action is necessary to begin therapy.

### 4 Align heel with edge of cuff



NOTE: Look at image on foot cuff for help aligning.

### 5 Check for snug fit



Wrap and secure, cuff should fit snug like a sneaker.

### 6 Attach tubing to foot cuff(s)



NOTE: Strap wraps around back of heel.

### 7 Turn Controller on




Wait for internal checks to finish before proceeding.

### 8 Checkmark(s) will appear. Press A and/or B button(s) next to checkmark(s).



### 9 Therapy will now begin

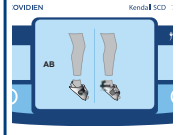

No further action is necessary to begin therapy.

- Wear as prescribed. Remove garments for brief periods to walk or to bathe.

**For any questions**  
please contact your local service provider.

## Use as Directed



**Rx ONLY**



Caution, consult accompanying documents


© 2011 Covidien. Printed in China.  
Covidien Inc, 15 Hampshire Street,  
Mansfield, MA 02048 USA.  
www.covidien.com  
SMF1111-013




COVIDIEN™

REF H29525

## Sistema de compresión secuencial Kendall SCD™ 700

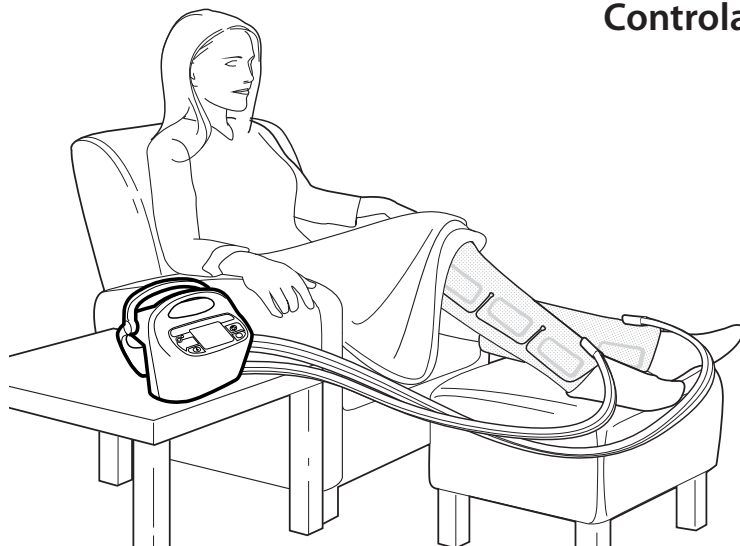

### Controlador y juego de mangueras

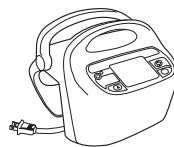


Controlador



Mangueras


### Prendas (empacadas por separado)

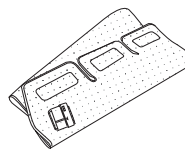

Botas de  
compresión




Manguitos  
de pie

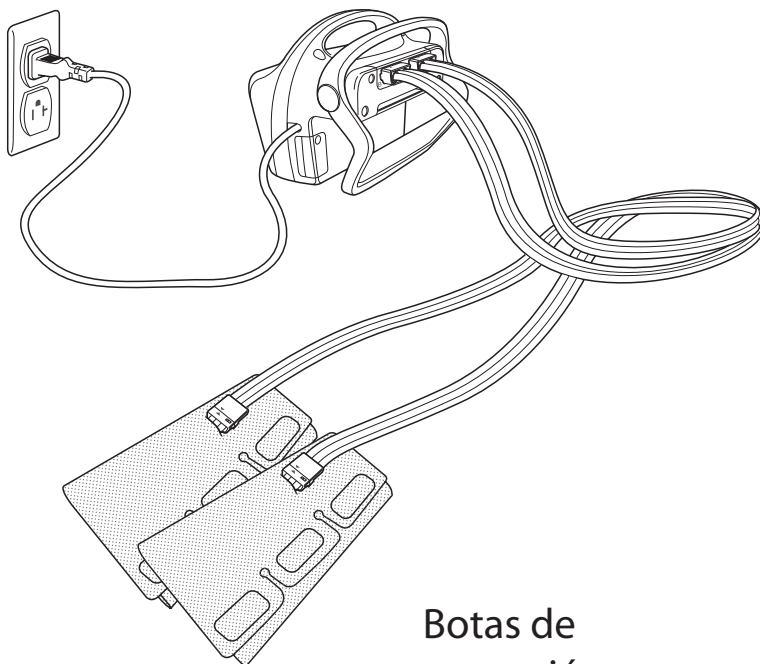

Botas de  
compresión

### Manguitos de pie

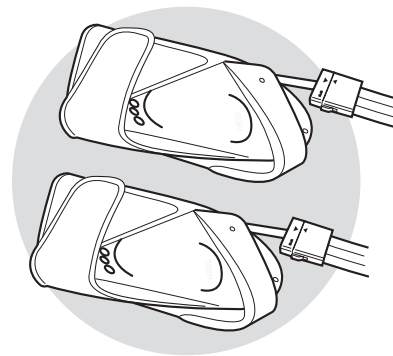

# Guía de inicio rápido

## Configuración del controlador

### 1 Instale el controlador:


En una superficie plana cerca de una silla



En una superficie plana cerca de la cama



Coloque el controlador en el pie de cama

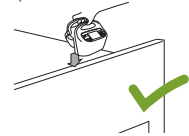

**NO cubra el controlador**


### 2 Enchufe el controlador



Todavía **NO** enciende el controlador



### 3 Conecte las mangueras al controlador

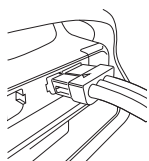

## Configuración de las botas de compresión




### 4 Envuelva la pierna con la bota




NOTA: El conector de la manguera debe quedar a la altura del tobillo.

### 5 Revise el ajuste

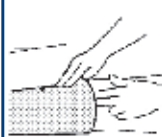

Un buen ajuste deja solo espacio suficiente para dos dedos entre la bota y la pierna.

### 6 Conecte la manguera a la bota

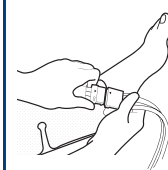


### 7 Encienda el controlador




Espera que terminen las comprobaciones internas.

### 8 Ahora comienza el tratamiento

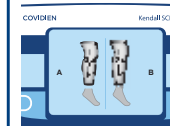

Quando se utilizan botas de compresión, no se requieren otros pasos para comenzar el tratamiento.

## Configuración de los manguitos de pie

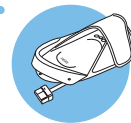

### 4 Alinee el talón con el borde del manguito



NOTA: Consulte la imagen del manguito de pie si necesita ayuda para la alineación.

### 5 Revise el ajuste



Una vez envuelto y asegurado, el manguito debe quedar ajustado como el calzado deportivo.

### 6 Conecte la manguera al manguito de pie




NOTA: La correa se pasa por detrás del talón.

### 7 Encienda el controlador




Espera que terminen las comprobaciones internas antes de proceder.

### 8 Aparecen marcas de verificación. Presione los botones A o B al lado de las marcas de verificación.

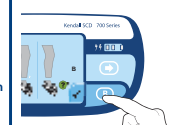

### 9 Ahora comienza el tratamiento

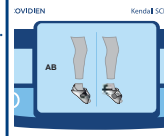

No se requieren otros pasos para comenzar el tratamiento.

- Usar según prescripción médica. Quite las prendas durante períodos breves para que el paciente camine o se bañe.

**Ante cualquier consulta,**  
contacte a su proveedor de servicios local.

## Utilizar según las instrucciones



**Rx  
ONLY**



Precaución,  
consulte  
los documentos  
que acompañan al  
producto.